



Зміни: §  
Видалення: §

## ЛЕЙСОН Промивна/Системна рідина (REF 319100)

### 1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Рідина LIAISON® Wash/System Liquid потрібна для аналізаторів LIAISON® і LIAISON® XL для промивання магнітних частинок, які використовуються в імуноаналізі LIAISON®. Рідина LIAISON Wash/System Liquid також потрібна для промивання голок для піпетування та системи трубок аналізатора LIAISON®. Виріб призначений для діагностики *in vitro* в професійних лабораторних умовах на сімействі автоматизованих аналізаторів LIAISON®.

#### CONTENTS СКЛАД НАБОРУ

REF 319100

6 пляшок, приблизно на 1000 визначень кожна

6 x 1 L LIAISON® Wash/System Liquid (10 x концентрат):  
фосфатний буферний розчин, < 0,1% азиду натрію



Для отримання додаткової інформації, зокрема про правильне виконання аналізів LIAISON®, зверніться до інструкцій щодо використання аналізу, який потрібно виконати.

### 2. ПІДГОТОВКА

**ПРИМІТКА:** Приготуйте LIAISON® Wash/System Liquid принаймні за 6 годин до використання.

- Використовуйте тільки схвалені DiaSorin 10-літрові контейнери, які постачаються з аналізаторами LIAISON® і LIAISON® XL.
- Наповніть 10-літровий контейнер очищеною водою до позначки 9 л.

**ПРИМІТКА:** Використовуйте лише воду, визначену згідно з рекомендаціями CLSI для лабораторій «Instrument Feed Water», як зазначено у відповідному посібнику користувача LIAISON® або LIAISON® XL.

- Повільно додайте вміст 1 пляшки LIAISON® Wash/System Liquid, уникаючи утворення піни.
- Обережно перемішайте водний розчин LIAISON® Wash/System Liquid, продовжуючи уникати утворення піни.
- Помістіть кришку на контейнер. Тримайте кришку вільною (не закручуйте кришку до кінця), щоб забезпечити належну дегазацію розчину Wash/System Liquid.
- Підготовлений контейнер розчину Wash/System Liquid повинен стояти (без під'єднання до аналізатора) не менше 6 годин до завершення дегазації.

**ПРИМІТКА:** При доливанні залишків дегазованої промивної/системної рідини (Wash/System Liquid) з одного контейнера в інший, контейнер з об'єднаною рідиною повинен залишатися ізольованим (без підключення до аналізатора) протягом не менше ніж 6 годин до завершення дегазації.

Після закінчення 6-годинного періоду дегазації повністю закрутіть кришку на контейнері та під'єднайте контейнер до аналізатора, дотримуючись інструкцій відповідного посібника користувача LIAISON® або LIAISON® XL.

### 3. УМОВИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігання концентрату Wash/System Liquid: При температурі 15– 30 °C до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
- Тривалість зберігання приготованого розчину Wash/System Liquid: 4 тижні при 15 – 30°C.
- Уникайте потрапляння прямого світла.

#### 4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ *IN VITRO* – Не для внутрішнього чи зовнішнього застосування у людей чи тварин.

##### ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Усі зразки, біологічні реагенти та матеріали, які використовуються для аналізу, слід вважати потенційно здатними переносити інфекційні агенти. Уникайте контакту зі шкірою, очима або слизовими оболонками. Під час тестування дотримуйтесь правил промислової гігієни.
- Не їжте, не пийте, не куріть і не використовуйте косметику в лабораторії.
- Не піпетуйте розчини ротом.
- Уникайте прямого контакту з усіма потенційно інфекційними матеріалами, надягаючи лабораторний халат, захист для очей/обличчя та одноразові рукавички.
- Після закінчення кожного аналізу ретельно мийте руки.
- Уникайте розбризкування або утворення аерозолів під час обробки, розведення або перенесення зразків та реагентів. Будь-який розлитий реагент слід знезаразити 10% розчином відбілювача (що містить 0,5% гіпохлориту натрію) і утилізувати як потенційно інфекційний.
- Відходи слід утилізувати відповідно до чинних правил і вказівок установ, під юрисдикцією яких знаходиться лабораторія, а також регламентів кожної країни.
- Не використовуйте набори або компоненти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

**Інформація про хімічну небезпеку та техніку безпеки:** Реагенти в цьому наборі класифікуються відповідно до US OSHA Hazard Communication Standard; individual US State Right-to-Know laws; Canadian Centre for Occupational Health and Safety Controlled Products Regulations; і відповідних директив Європейського Союзу (додаткову інформацію див. у Паспорті безпеки матеріалу).

##### GHS/CLP:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
|                       | Азид натрію    |
| CAS No.:              | 26628-22-8     |
| Реагенти:             | BUF WASH 10X   |
| Класифікація:         | Не вимагається |
| Сигнальне слово:      | Не вимагається |
| Піктограма:           | Не вимагається |
| Повідомлення про      | Не вимагається |
| Інформація про заходи | Не вимагається |

Глосарій символів і Паспорт безпеки надаються в електронному вигляді на сайті [www.diasorin.com](http://www.diasorin.com).

**РЕАКТИВИ, ЩО МІСТЯТЬ АЗИД НАТРІЮ:** Азид натрію може вступати в реакцію зі свинцевим або мідним водопроводом, утворюючи вибухонебезпечні азиди металів. Після утилізації промийте великою кількістю води, щоб запобігти накопиченню азиду. Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "Decontamination of Laboratory Sink Drains to Remove Azide Salts" в Manual Guide-Safety Management No. CDC-22, видана Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, 1976.

Лише для ЄС: майте на увазі, що про будь-який серйозний інцидент, який стався з цим медичним виробом для IVD, слід повідомляти DiaSorin та компетентний орган держави-члена ЄС, у якій проживає користувач та/або пацієнт.

## СИМВОЛИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ З ВИРОБАМИ



Відповідність вимогам Європейського союзу



Використати до (дата)



Виробник



Ознайомтесь з інструкцією щодо застосування.



Медичний виріб для діагностики *In vitro*



Партія



Склад набору



Номер за каталогом



Обмеження температури



Уникайте потрапляння прямого світла.

Зберігайте у вертикальному положенні

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 06.2024



### ДіаСорін Інк.

1951 Нортвестерн Авеню, Стілловотер, MN55082, США

DiaSorin Inc.

1951 Northwestern Avenue, Stillwater, MN 55082, USA



### Уповноважений представник в Україні:

#### ТОВ «ЛАБСЕППОРТ»

01133, місто Київ, б. Лесі Українки, будинок 34, Україна

Тел: +380673234344, E-mail: [info@labsupport.com.ua](mailto:info@labsupport.com.ua)



DiaSorin Inc.  
1951 Northwestern Avenue  
Stillwater, MN 55082  
[USA](#)

[UK Responsible Person:](#)  
[DiaSorin Italia S.p.A.](#)  
[UK Branch](#)  
[Central Road](#)  
[Dartford Kent DA1 5LR](#)  
[UK](#)



DiaSorin [Italia](#) S.p.A.  
[Via Crescentino snc](#)  
13040 Saluggia (VC)  
Italy