



Зміни: Оновлення офіційної назви виробника;
Видалення: -

ЛІЕЙСОН XL Одноразові наконечники (REF X0015)

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

ЛІЕЙСОН XL Одноразові наконечники (REF X0015) є аксесуарами для діагностики in vitro і призначені для використання з аналізатором ЛІЕЙСОН XL для проведення аналізів ЛІЕЙСОН XL. Наконечники набирають і розподіляють відповідні кількості зразка.

Як одноразові наконечники, так і лотки не можна використовувати повторно, їх потрібно викинути після завершення процедури аналізу. Використовуйте лише схвалені DiaSorin одноразові наконечники.

2. СКЛАД НАБОРУ

- 1 транспортна упаковка містить 12 коробок користувача.
 - Кожна коробка користувача містить 6 лотків одноразових наконечників по 96 одноразових наконечників на лоток.
 - 576 наконечників на коробку користувача, що становить 6912 одноразових наконечників на транспортну упаковку.
- Для отримання додаткової інформації, такої як правильне виконання аналізу ЛІЕЙСОН, зверніться до інструкцій щодо використання аналізу, який потрібно виконати.

3. ПОВОДЖЕННЯ

Опис правильної процедури поводження див. у посібнику користувача ЛІЕЙСОН XL.

4. ЗБЕРІГАННЯ

- Нерозкритим при температурі 0-30°C в оригінальній упаковці.
- Захищайте від впливу сонячного світла та вологи.
- Після використання знову закрийте коробку, щоб захистити наконечники від забруднення.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

- Дотримуйтеся звичайних запобіжних заходів, необхідних для роботи з усіма лабораторними реагентами.
- З відходами слід поводитись обережно та утилізувати їх відповідно до лабораторних інструкцій і законодавчих положень, що діють у кожній країні.
- Якщо упаковка матеріалу була пошкоджена під час доставки, негайно повідомте про це представника DiaSorin. У цьому випадку не слід використовувати наконечники до отримання дозволу від DiaSorin.
- Будь-які одноразові наконечники, чия чистота та цілісність неможливо гарантувати (наприклад, якщо вони впали на землю), не можна використовувати в системі, і їх слід негайно викинути.
- На аналізаторі ЛІЕЙСОН XL слід використовувати лише наконечники з лотків, що надходять із коробок користувача. Щоб запобігти забрудненню та забезпечити належну відстежуваність, не дозволяється завантажувати наконечники вручну.
- Наконечники не можна використовувати повторно.
- Лотки наконечників не можна використовувати повторно.
- Тільки для професійного лабораторного використання.

Лише для ЄС: майте на увазі, що про будь-який серйозний інцидент, який стався з цим медичним виробом для IVD, слід повідомляти DiaSorin та компетентний орган держави-члена ЄС, у якій проживає користувач та/або пацієнт.

200/007-111, 03 - 2022-07

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 04.2024



ДіаСорін Італія С.п.А.

Via Кресчентіно, снс, 13040 Салуджа (ВК), Італія

DiaSorin Italia S.p.A.

Via Crescentino, snc, 13040 Saluggia (VC), Italy

200/007-1



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «ЛАБСЕППОРТ»

01133, місто Київ, б. Лесі Українки, будинок 34, Україна

Тел: +380673234344, E-mail: info@labsupport.com.ua