



DiaSorin Italia S.p.A.
Via Crescentino snc - 13040 Saluggia (VC) - Italy
www.diasorin.com



ЛІЕЙСОН XL Кювети (REF X0016)

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Кювети ЛІЕЙСОН XL Кювети (REF X0016) є аксесуарами для діагностики in vitro і призначені для використання з аналізатором ЛІЕЙСОН XL для проведення аналізів ЛІЕЙСОН XL.

У кюветах розміщується рідка суміш реагентів і зразків, в якій відбувається аналітична реакція.

Кювети не можна використовувати повторно, їх потрібно викинути після завершення процедури аналізу.

Використовуйте лише схвалені DiaSorin кювети.

2. СКЛАД НАБОРУ

- 1 транспортна упаковка містить 4 коробки користувача.
- Кожна коробка користувача містить 9 прозорих пластикових пакети, по 200 кювет в пакеті.
- в одній коробці користувача міститься 1800 кювет, що становить 7200 окремих лунок кювет на транспортну упаковку.
- Для отримання додаткової інформації, такої як правильне виконання аналізу ЛІЕЙСОН, зверніться до інструкцій з використання аналізу, який потрібно виконати.

3. ПОВОДЖЕННЯ

Опис правильної процедури поводження див. у посібнику користувача ЛІЕЙСОН XL.

4. ЗБЕРІГАННЯ

- Нерозкритим при температурі 0-30°C в оригінальній упаковці.
- Захищайте від впливу сонячного світла та вологи.
- Після відкриття знову закрийте пакет, щоб захистити кювети від забруднення.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

- Дотримуйтеся звичайних запобіжних заходів, необхідних для роботи з усіма лабораторними реагентами.
- З відходами слід поводитись обережно та утилізувати їх відповідно до лабораторних інструкцій і законодавчих положень, що діють у кожній країні.
- Якщо упаковка матеріалу була пошкоджена під час доставки, негайно повідомте про це представника DiaSorin. У цьому випадку не слід використовувати кювети до отримання дозволу від DiaSorin.
- Будь-які кювети, чию чистоту та цілісність неможливо гарантувати (наприклад, якщо вони впали на землю), не можна використовувати в системі, і їх слід негайно викинути.
- На аналізаторі ЛІЕЙСОН XL слід використовувати лише кювети, що надходять із коробок користувача.
- Кювети не можна використовувати повторно.
- Тільки для професійного лабораторного використання.

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 04.2024



ДіаСорін Італія С.п.А.
Віа Кресцентіно, снс, 13040 Салуджа (ВК), Італія
DiaSorin Italia S.p.A.
Via Crescentino, snc, 13040 Saluggia (VC), Italy



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «ЛАБСЕППОРТ»
01133, місто Київ, б. Лесі Українки, будинок 34, Україна
Тел: +380673234344, E-mail: info@labsupport.com.ua